

SMARTLEG TRANSPARENT, SMARTLEG SEMI-TRANSPARENT, SMARTLEG OPAQUE, SMARTLEG COLLECTION, SMARTLEG BB

Classe II, pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa

Disponibles en format collants, mi-bas* et bas autofixant*.

*Concerne uniquement les gammes Smartleg® Transparent et Smartleg® Semi-Transparent.

PRINCIPALES MATIERES : Polyamide dont Polyamide microfibres, Elasthane, Silicone (Uniquement en format bas autofixant).

MODE D'ACTION : La compression veineuse élastique exerce une pression décroissante de la cheville vers le haut de la jambe, elle permet d'améliorer le retour vers le cœur.

INDICATIONS

- Jambes lourdes ou douloureuses, en position assise ou en station debout prolongée.
- Varicosités, varices.
- Après chirurgie des varices ou sclérothérapie.
- Prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.
- Grossesse et 6 semaines après l'accouchement / 6 mois après césarienne (dans la limite de l'extensibilité du produit).
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures selon l'avis de votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS

- Intolérance / Réaction allergique au produit.
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0,6.
- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).
- Thrombose septique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Laver le produit avant la première utilisation.
- En cas d'AOMI avec IPS >0,6 et <0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.
- Ne pas appliquer directement sur peau lésée.
- En cas de réaction cutanée, retirez le produit et parlez-en à votre médecin ou pharmacien.
- Infections cutanées : d'abord soigner l'infection avant de porter la compression.
- En cas de changement ou évolution morphologique (grossesse, prise/perte de poids, résorption d'œdème...), consultez votre médecin, pharmacien ou orthopédiste pour réajuster la taille ou le format de votre produit.
- En cas de superposition de produits de format chaussettes / mi-bas, veiller à ne pas positionner les bords côtes l'un sur l'autre.

EFFETS INDÉSIRABLES

- Réactions cutanées (éruptions cutanées, rougeurs, démangeaisons, irritations, ampoules au niveau de la bande autofix des bas).
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification aux Laboratoires Innothéra et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).
- Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

CONSEILS D'ENFILAGE



CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage : A la main ou en machine à 30°C, sans adoucissant ni agent de blanchiment.

Essorage : Sans tordre.

Séchage : A plat, à l'abri de toute source de chaleur, ne pas repasser.

